

De venta en farmacias y asociaciones para diabéticos.

Contenedor de seguridad para agujas de lápiz de insulina

Directiva / 2010 / 32 / UE



Venta on-line

El contenedor de agujas de APE MEDICAL es un sistema único y patentado. Con este dispositivo podrá retirar las agujas de una forma segura y fácil.

Instrucciones de uso

Paso ①

Abrir el contenedor desactivando el sistema de seguridad para niños. Apretar los dos lados al mismo tiempo para levantar la tapa amarilla.

Paso ②

Aguantar el contenedor con la mano izquierda e insertar el lápiz con la aguja depositada en la apertura del contenedor.

Paso ③

Empujar el lápiz hacia dentro hasta que la aguja quede encajada en la abertura.

(Oirá un "click")

Paso ④

Desenroscar la aguja girando en sentido contrario a las agujas del reloj. La aguja se desprende del lápiz.

Paso ⑤

Retirar el lápiz de insulina del contenedor. La aguja queda dentro. Cerrar la tapa amarilla.

Paso ⑥

Acabado el uso, consulte las normas vigentes en su país para el correcto reciclado del envase Diabbox, contenedor de seguridad de agujas de insulina.



**¡Protégete bien!
¡No te pinches!**

- Contenedor hasta 120 agujas.
- Ideal para el uso en casa, viajes y/o el día a día.
- Permite depositar las agujas de forma discreta y segura, evitando el contacto con las mismas e impidiendo cualquier pinchazo accidental.

